

GEBRAUCHSANWEISUNG



- Stabilisierende Kniegelenkbandage
- Universalgröße für Knieumfang von ca. 34-48 cm
- 2 seitlich integrierte ergonomisch geformte Kunststoffgelenkschienen
- Individuell einstellbar durch 5 Klettverschlüsse zur optimalen Kniestabilisierung
- Anwendbar für körperliche und sportliche Belastungen
- Zur Gelenkstabilisierung, für Überlastungsschmerzen, Kniegelenkverletzungen, chronische Gelenkschmerzen, Gelenkverschleiß
- Hautfreundliches und atmungsaktives Innenmaterial
- Inkl. Gebrauchsanweisung
- 24 Monate Gewährleistung

Nr.	Thema	Seite
1.0	Was bedeuten die Symbole	3
2.0	Grundinformation	3
3.0	Sicherheitshinweise	3-4
4.0	Lieferumfang/Teilebeschreibung	4
5.0	Anwendung der Kniegelenkbandage	5
6.0	Aufbewahrung/Wartung der Kniegelenkbandage	6
7.0	Reinigung und Pflege der Kniegelenkbandage	6
8.0	Entsorgung der Kniegelenkbandage	6
9.0	Technische Daten	6
10.0	Garantiebedingungen	7

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Kniegelenkbandage und danken für Ihr Vertrauen. Um eine optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihrer Kniegelenkbandage zu gewährleisten, bitten wir Sie, vor der ersten Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung zu lesen. Somit ist sichergestellt, dass Sie lange Freude an diesem Artikel haben werden.

1.0 Was bedeuten die Symbole

Die Sicherheitssymbole, welche in dieser Gebrauchsanweisung gezeigt werden, sind Hinweise zum ordnungsgemäßen Gebrauch der Kniegelenkbandage und zum Schutze Ihrer Sicherheit.

Die Symbole stehen für folgende Inhalte:



Unbedingt die Gebrauchsanweisung lesen und beachten.



Achtung/Gefahr: Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr einer ernsthaften Verletzung/Schaden.

2.0 Grundinformationen

Eine Kniegelenkbandage kann bei Kniebeschwerden dazu beitragen, weiterhin mobil und für sportliche Aktivitäten noch mobil zu bleiben. Zur Schmerzlinderung trägt die stabilisierende Wirkung und die therapeutische Wärme beim Tragen der Kniegelenkbandage bei.

3.0 Sicherheitshinweise



- 3.0.1 Im Falle eines Defektes darf die Kniegelenkbandage nicht repariert, verwendet oder modifiziert (verändert) werden.
- 3.0.2 Sollten während der Anwendung der Kniegelenkbandage Hautveränderungen, Schmerzen, Schwellungen, Unwohlsein oder andere Unregelmäßigkeiten auftreten, stoppen Sie sofort die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- 3.0.3 Falls Sie irgendwelche Zweifel bezüglich der Anwendung der Kniegelenkbandage haben, sollten Sie vorher Ihren Arzt dazu befragen.
- 3.0.4 Verwenden Sie die Kniegelenkbandage nicht ohne Ihren Arzt zu befragen, an Stellen, die unerklärlich schmerzen, an geschwollenen Muskeln oder in Folge einer schweren Muskelverletzung.
- 3.0.5 Missbräuchlicher und nicht anwendungsorientierter Einsatz muss vermieden werden. Es darf kein anderes Zubehör von anderen Geräten verwendet werden.
- 3.0.6 Benutzen Sie die Kniegelenkbandage nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, zur Fixierung des Kniegelenks. Die Kniegelenkbandage ist nicht für den gewerblichen und kommerziellen Bereich bestimmt.

- 3.0.7 Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung während der Lebenszeit des Produktes für spätere Fragen auf, und händigen Sie diese bei Weitergabe der Kniegelenkbandage an Dritte ebenfalls aus. Machen Sie die Anleitung auch für Dritte zugänglich. Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil der Kniegelenkbandage.
- 3.0.8 Lassen Sie die Kniegelenkbandage nicht in Kinderhände gelangen. Die Kleinteile könnten von Kindern verschluckt werden und Kinder können daran ersticken. Kinder können sich bei der Verwendung der Kniegelenkbandage verletzen.
- 3.0.9 Folgende Personen sollten eine Kniegelenkbandage nicht benutzen: Kinder unter 3 Jahren, Hilflose, Allergiker, Personen mit Immunschwäche, Personen mit Schmerzen aus ungeklärter Ursache, Diabetes, Kreislaufbeschwerden, Personen mit Durchblutungsstörungen der äußeren Arterien und Geweben, Herz-Kreislaufkrankungen, Lähmungen oder Nervenschmerzen, fragen Sie Ihren Arzt.
- 3.1.0 Benutzen Sie die Kniegelenkbandage nicht im Bett, beim Schlafen oder bei längeren Ruhephasen. Vermeiden Sie ein Einschlafen während der Anwendung. Stellen Sie sich zur Sicherheit einen Wecker, damit die maximale Anwendungszeit von 2 Stunden nicht überschritten wird.
- 3.1.1 Vermeiden Sie einen zu hohen Druck bei einer Anwendung der Kniegelenkbandage, damit keine Mangel durchblutung und keine Blutsperrung entsteht. Der Druck der Kniegelenkbandage muss so eingestellt sein, dass ein angenehmer Druck empfunden wird. Bei einem zu hohen Druck werden die Blutgefäße und Nerven eingeschnürt und es kann zu irreparablen Gewebeschäden und zum Verlust von Gliedmaßen führen.
- 3.1.2 Die Anleitung während der Lebensdauer des Produktes behalten.
- 3.1.3 Legen Sie keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände auf der Kniegelenkbandage ab.
- 3.1.4 Durch die Verwendung der Kniegelenkbandage, kann es unter Umständen zu Hautirritation kommen. Bei Auftreten von Hautirritationen z.B. Rötungen, Blasenbildung oder Juckreiz die Kniegelenkbandage nicht mehr verwenden. Verwenden Sie die Kniegelenkbandage nicht dauerhaft an der gleichen Körperstelle, da es zu Hautirritationen führen kann.
- 3.1.5 Die Kniegelenkbandage darf nicht auf offene Wunden, empfindliche Hautpartien und frische Narben angewendet werden.

4.0 Lieferumfang/Teilebeschreibung

- 1 x Kniegelenkbandage
- 1 x Gebrauchsanweisung

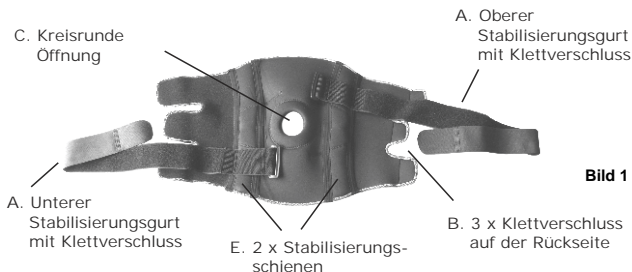


Bild 1

5.0 Anwendung der Kniegelenkbandage



Sollten Sie die Kniegelenkbandage über einem Kleidungsstück tragen, sollte dieses sehr eng am Knie anliegen. Durch eine Faltenbildung des Kleidungsstücks kann es zu einer Einschnürung der Blutgefäße und Nerven kommen und die Blutzufuhr wird eingeschränkt.

Schritt 1:

Beim Anlegen der Bandage darauf achten, dass die kreisrunde Öffnung „C“ (Bild 2) mittig zur Kniescheibe platziert ist. Anschließend die Klettverschlüsse „B“ (Bild 1) auf der Rückseite vom Knie in gewünschter Position einstellen.

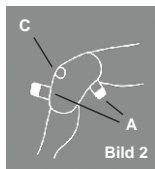


Bild 2

Schritt 2:

Die beiden Bänder mit den Klettverschlüssen „A“ um das Knie herum legen und auf der Bandage in gewünschter Position fixieren „D“ (siehe Bild 2 und 3). Die Bandage muss am Knie anliegen und gut fixiert sein. Achten Sie darauf, dass die Kniegelenkbandage nicht zu eng anliegt damit keine Blutgefäße und Nerven eingeschnürt werden.

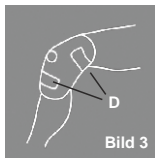


Bild 3

Hinweise zur Anwendungszeit:

Reinigen Sie vor der Anwendung der Kniegelenkbandage die Auflageflächen am Knie. Tragen Sie die Kniegelenkbandage nicht länger als 2 Stunden permanent am Knie. Die maximale Tragezeit beträgt 6-8 Stunden pro Tag. Die Kniegelenkbandage darf nicht während der Schlafphase, einer längeren Ruhephase oder mit einem angewinkelten Bein verwendet werden.

6.0 Aufbewahrung der Kniegelenkbandage

- 6.1 Die Kniegelenkbandage ist wartungsfrei.
- 6.2 Halten Sie die Kniegelenkbandage zur Aufbewahrung fern von Wärmequellen, Sonnenlicht und Feuchtigkeit. Bewahren Sie die Kniegelenkbandage sauber, trocken und an einem kühlen Ort auf.

7.0 Reinigung und Pflege der Kniegelenkbandage

- 7.1 Prüfen Sie regelmäßig die Bandage auf Beschädigungen. Achten Sie auf die Sauberkeit und Funktion der Kniegelenkbandage.
- 7.2 Zur Desinfektion kann ein geeignetes handelsübliches Desinfektionsmittel verwendet werden. Anschließend die Kniegelenkbandage gut trocknen lassen.
- 7.3 Beachten Sie die Wasch- und Pflegesymbole auf den Produktetiketten der Kniegelenkbandage. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.



8.0 Entsorgung der Kniegelenkbandage

- 8.1 Sollte die Kniegelenkbandage einmal zur Wiederverwertung zugeführt werden, muss die Entsorgung des Artikels gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Fragen Sie hierzu bei Ihrer Stadt oder einem Entsorgungsunternehmen nach.

9.0 Technische Daten:

Modell Typ:	Kniegelenkbandage PKB 288
Größe:	Universalgröße für Knieumfang von ca. 34 - 48 cm
Abmessungen:	zusammengelegt ca. 31 x 19 cm (LxB)
Material:	SBS Elastomer, ABS, Polyester, Polyamide, PP, Elastane
Gewicht:	ca. 260 g
	Die Kniegelenkbandage PKB 288 ist konform gemäß der EU-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte.
	 V4113PKB288, ist die Chargenbezeichnung
	Herstellungsdatum (Jahr/Monat): 2013-07
	Hersteller: Handelshaus Dittmann GmbH, Kissingener Straße 68, D-97727 Fuchsstadt/Germany

10.0 Garantiebedingungen

Die von Ihnen erworbene Kniegelenkbandage wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und hergestellt.

Die gesetzliche Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Bitte bewahren Sie den Kassenbeleg als Nachweis für den Kauf der Kniegelenkbandage auf, um die Geltendmachung eines Gewährleistungsfalles zu erheben.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind:

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch
- Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- Verschleißteile
- Schäden durch unbefugte Eingriffe und Eigenverschulden des Kunden

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit haben Sie die Möglichkeit, den defekten Artikel zur Reparatur an die u.a. Adresse zu senden. Reparaturen nach der Gewährleistungszeit sind kostenpflichtig.

Bei technischen Problemen, Fragen und Gewährleistungsansprüchen zu diesem Artikel können Sie sich wie folgt an uns wenden:

HINWEISE: Bitte wenden Sie sich bei einer Reklamation des Gerätes zuerst an den Service-Center! Bei Bedarf, wird eine Geräte-Rückholung vom Service-Center veranlasst. UNFREI frankierte Pakete werden vom Service-Center nicht angenommen!

Handelshaus Dittmann GmbH

Abteilung Service-Center

Kissinger Straße 68

D-97727 Fuchsstadt / Germany

e-mail: hotline@servicecenter.tv

Telefon-Hotline: + 49 (0) 180-6000228 (0,20 € pro Anruf aus dem deutschen

Festnetz; maximal 0,60 € pro Anruf aus den deutschen Mobilfunknetzen)

www.dittmann-gmbh.com

Mit freundlichen Grüßen



Hersteller

Handelshaus Dittmann GmbH

Kissinger Straße 68

D-97727 Fuchsstadt/Germany

